
HELICOBAKTEERIN OSOITUSTESTI
Helicobacter Pylori – Ureaasi testi (kasetti- tai liuskaformaatti)

Yksivaiheinen immunokromatografinen testi H. Pylori-Ureaasin osoittamiseksi syljestä ja biopsianäytteistä.

H. Pylori – Urease Test Cassette (kasettiformaatti)

H. Pylori – Urease Test Strip (liuskaformaatti)

Pakkauskoko: 20 testiä

Säilytys: 4-30 °C, testikasetit ja – liuskat huoneenlämmössä kosteudelta ja kuumuudelta suojattuina

Testipakkaus:

- 20 testikasetti/-liuskapakkausta: testikasetti/testiliuska, kertakäyttöpipetti, kuivausainepussi
- Puskuriliuos
- Koeputket
- Syljen keräysastiat
- Käyttöohjeet

Näytteensäilytys:

Huom! Syöminen ja juominen kielletty yksi (1) tunti ennen sylkinäytteen ottamista.

Jos biopsianäytettä tai sylkeä ei testata välittömästi, näyte voidaan säilyttää jääkaapissa 24 tuntia tyhjässä kuljetusputkessa. Näyte ei saa jäätyä.

Näytteen valmistus

Sylkinäyte

1. Ennen testin suorittamista näytteet on oltava huoneenlämpöisiä.
2. Laita sylkinäyte keräysastiaan.
3. Pipetoi pakkauksessa olevalla kertakäyttöpipetillä keräysastiasta 4 tippaa sylkeä koeputkeen.
4. Lisää 2 tippaa puskuria koeputkeen.

Sylkinäyte on testattava 10 minuutin kuluessa syljen keräämisestä.

Biopsianäyte

1. Lisää 8 tippaa puskuria koeputkeen.
2. Laita biopsianäyte koeputkeen ja sekoita putkea voimakkaasti n. 15 sekuntia.

Testin suoritus

1. Ota testikasetti/-liuska pois foliopussista ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle pinnalle.
 2. Pipetoi 2-3 tippaa sylki-puskuriseosta tai biopsianäyte-puskuriseosta näytekuppaan S (=sample).
 3. Lue tulos 5-15 minuutin kuluessa. Testiä ei saa tulkita 20 minuutin jälkeen
- Positiivinen tulos: 2 violetinpunaista viivaa kohdissa T (= testi) ja C (=kontrolli)
Negatiivinen tulos: 1 viiva kohdassa C (sisäinen kontrolli). Tultava aina näkyviin!
Hylätty tulos: Ei lainkaan viivoja tai viiva ainoastaan kohdassa T (=testi). Uusi testi.



Ekoweb Ltd.

Kaarina
Finland

Tel. +358 50 3633969

Fax +358 22433786


info@ekoweb.fi

www.ekoweb.fi

VAT ID

FI10309538

Kasettitesti

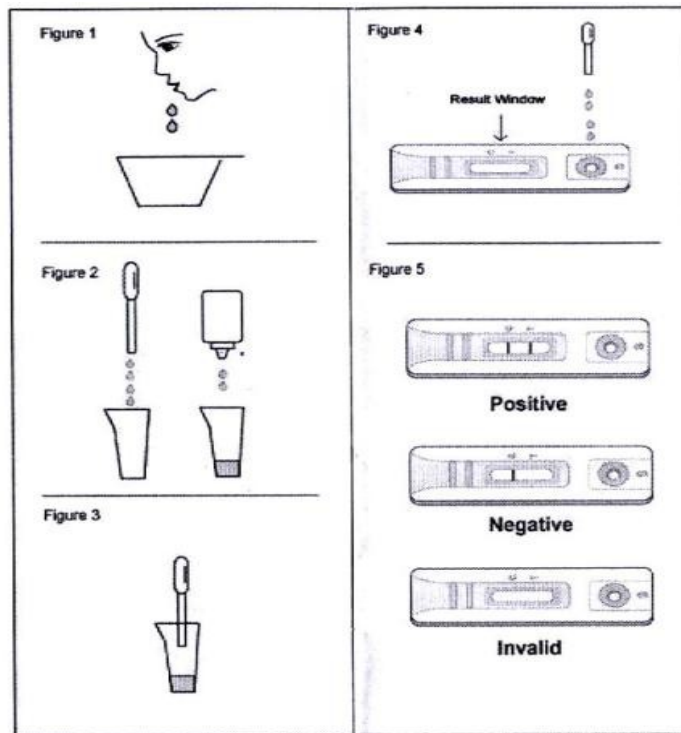

Liuskatesti

