


INFLUENZA A+B TEST STRIP PIKATESTI INFLUENSSA VIRUS A:n JA B:n OSOITTAMISEEN

Pakkauskoko: 25 testiä
Säilytys: 2-30 °C
Säilyvyysaika valmistuksesta: 20–24 kk

INFLUENZA A+B TEST STRIP

- kvalitatiivinen immunokromatografinen testi (liuskatestiformaatti)
- löytää influenssavirukset A:n ja B:n sekä erottelee ne toisistaan
- ei tarvitse lukijalaitetta
- nasaali tikkunäyte tai imulimanäyte
- spesifisyys > 99 %
- herkkyys > 99 %
- helppo suorittaa ja tulos saadaan 10 minuutissa
- sopii myös päivystyskäyttöön

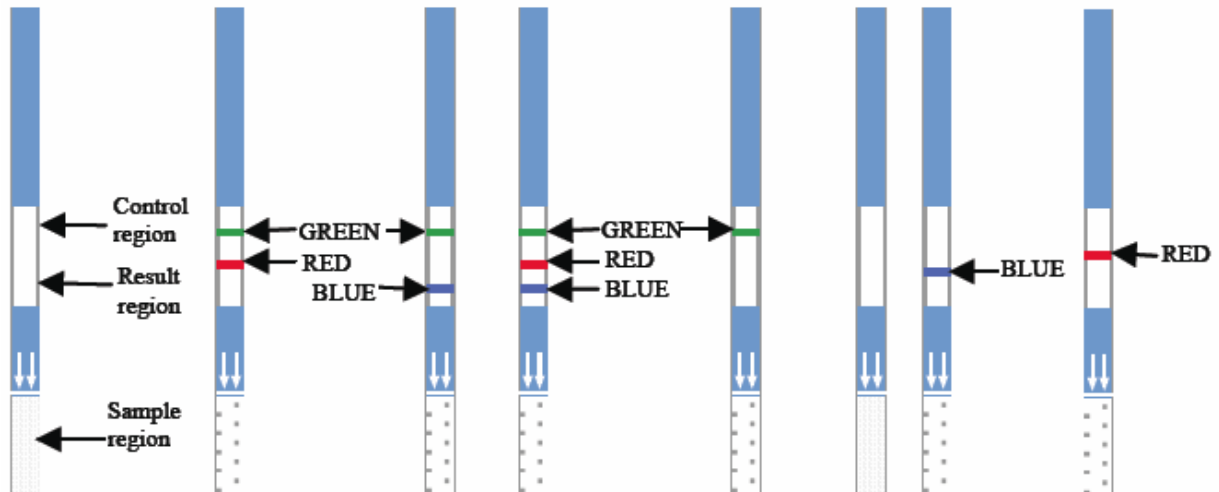

Negatiivinen tulos: Yksi **Vihreä viiva** (kontrolliviiva) testiliuskan reaktioalueella

Influenssa A positiivinen tulos: **Vihreän viivan** lisäksi testiliuskassa **punainen viiva**

Influenssa B positiivinen tulos: **Vihreän viivan** lisäksi testiliuskassa **sininen viiva**

Influenssa A ja B positiivinen tulos: **Vihreä viiva** ja **punainen viiva** ja **sininen viiva** yhtä aikaa testiliuskan reaktioalueella.

Hylätty tulos: - jos ei muodostu lainkaan viivoja
- jos ei muodostu **vihreää viivaa**
- jos muodostuu vain **punainen viiva** ja/tai **sininen viiva** ilman **vihreää viivaa** (kontrolliviiva). Suorita uusi testi!

Pakkaus sisältää:

- Koeputket



Ekoweb Ltd.

Kaarina
Finland

Tel. +358 50 3633969

Fax +358 22433786

info@ekoweb.fi

www.ekoweb.fi

VAT ID

FI10309538

-
- Reagenssi A:n (saliiniliuos) ja Reagenssi B:n (näytelaimennin)
 - Käyttöohjeet

Testin suorittamiseen tarvitaan lisäksi:

- Steriilit näytteenottotikut
- Kertakäyttöisiä pipettejä ja koeputkia
- Kertakäyttökäsineet
- Ajastinkello

Näytteen suoritus:

Testien, näytteenottotikkujen ja kontrollien tulee olla huoneenlämpöisiä (15–30 °C) ennen testin suorittamista. Älä avaa testipakkausta ennen kuin olet valmis suorittamaan testin. Tuo huoneenlämpöön vain tarvittava määrä testejä.

Nasaalinäyte (ota steriilillä näytteenottotikulla näyte sieraimesta pyörittämällä tikkua sieraimessa). Suorita testi mahdollisimman pian näytteenotosta.

- 1) Laita 10 tippaa Reagenssia A puhtaaseen koeputkeen ja aseta välittömästi näytteenottotikku putkeen.
- 2) Sekoita liuosta pyörittämällä tikkua voimakkaasti putken seinämiä vastaan vähintään 10 kertaa. Purista näytteenottotikun vanuosaa putken reunamaa vasten, jotta kaikki liuos tikusta jää putkeen. Poista näytteenottotikku.
- 3) Lisää 3 tippaa Reagenssia B. Sekoita liuosta kertakäyttöpipetillä vähintään 10 kertaa.
- 4) Ota huoneenlämpöinen testiliuska pakkauksesta ja käytä se mahdollisimman pian.
- 5) Aseta testiliuska koeputkeen liuskan valkoinen pää edellä, siten ettei liuskan kärjessä olevat merkinuolet kosketa näyteliuosta.
- 6) Lue tulos 10 minuutin kuluttua.

Nasaalihuuhdtelu- tai imulimanäyte:

- 1) Pipetoi 6 tippaa nasaalihuuhdtelu- tai imunäytettä puhtaaseen koeputkeen.
- 2) Lisää 3 tippaa Reagenssia B koeputkeen. Sekoita liuosta kertakäyttöpipetillä vähintään 10 kertaa.
- 3) Ota huoneenlämpöinen testiliuska pakkauksesta ja käytä se mahdollisimman pian.
- 4) Aseta testiliuska koeputkeen liuskan valkoinen pää edellä, siten ettei liuskan kärjessä olevat merkinuolet kosketa näyteliuosta.
- 5) Lue tulos 10 minuutin kuluttua.

