



Koriongonadotropiini (hCG) on istukkakudoksen syntetisoima dimeerirakenteinen glykoproteeinihormoni. Hormonia erittyy trofoblasteista hedelmöittyneen munasolun kiinnittymisestä lähtien. Se ylläpitää raskauden alussa keltarauhasen ja myöhemmin sikiön kivesten hormonieritystä.

MNITEST hCG® on immunokromatografinen kasetti-, liuska- tai keskivirtsatesti hCG:n määrittämiseksi seerumista, plasmasta tai virtsasta raskauden toteamiseksi.

Tuotenumero: **5405 D** (kasettitesti)
 5405 SUS (liuskatesti virtsa-/seeruminäytteestä)
 5405 SU (liuskatesti virtsanäytteestä)
 5405 MS (midstream eli keskivirtsatesti)



Ekoweb Ltd.

Kaarina
Finland

Tel. +358 50 3633969

Fax +358 22433786

info@ekoweb.fi

www.ekoweb.fi

VAT ID

FI10309538

MNITEST hCG® on

Luotettava: CE sertifikaatti 98/79/CE
ISO 9001 ja ISO 13485 sertifikaatit

Spesifisyys: 100 %

Herkkyyys: Seerumi: 10 mIU/ ml, tuloksen tulkinta alle 10 minuutissa
5 mIU/ ml, tuloksen tulkinta 10 – 20 minuutissa
Virtsa: 25 mIU/ml

Käytännöllinen: säilyvyysaika 18 kuukautta huoneenlämmössä
helppo yksivaiheinen suoritus


Käyttöohjeet:

MNITEST hCG® 5405 D kasettitesti

- * Aseta testi puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
- * Pipetoi 4 kokonaista tippaa (200 µl) testin näytekuoppaan (S = sample).
- * Odota kunnes punainen viiva/punaiset viivat ilmestyvät.
Lue tulos n. 5-10 minuutin kuluessa:



Positiivinen tulos: Kaksi punaista viivaa T (testi) ja C (kontrolli).

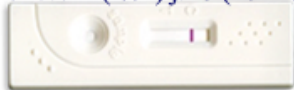

Negatiivinen tulos: Yksi punainen viiva C (kontrolli).



Hylätty tulos: Ei kontrolliviivaa C.

MNITEST hCG® 5405 SUS ja 5405 SU liuskatesti

- * Imeytä testiliuskaa virtsa- tai seeruminäytteessä näyteviivan saakka (maksimiviivan saakka).
- * Odota kunnes punainen viiva/punaiset viivat ilmestyvät. Lue tulos n. 5-10 minuutin kuluessa.



Positiivinen tulos: Kaksi punaista viivaa T (testi) ja C (kontrolli).



Negatiivinen tulos: Yksi punainen viiva C (kontrolli).



Hylätty tulos: Ei kontrolliviivaa C.

MNITEST hCG® 5405 MS midstream- eli keskivirtsatesti



- * Poista suojatulppa testitikusta.
- * Pidä kiinni testitikun pitimestä ja pidä imukärkeä alaspäin suoraan virtsasuihkussasi vähintään 10 sekuntia kunnes imukärki on kokonaan kastunut.
- * Älä kastele tulosikkunaa! Virtsanäyte voidaan ottaa myös puhtaaseen astiaan ja imukärki voidaan kastaa siihen vähintään 10 sekunniksi.
- * Aseta testitikku tasaiselle pinnalle tulosikkuna ylöspäin. Kun testin alkaessa toimia vaaleaa pinkkiä väriä alkaa liikkua tulosikkunassa.
- * Odota vähintään 3 minuuttia ja lue tulos. Jos mitään tulosta ei muodostu, odota vielä 1 minuutti.



Positiivinen tulos: Kaksi punaista viivaa tulosikkunassa kertoo, että olet mahdollisesti raskaana. Toinen viiva voi olla vaaleampi väriltään kuin toinen.



Negatiivinen tulos: Yksi viiva tulosikkunassa kertoo, että et ole raskaana.



Tulos on hylättävä, jos yhtäkään punaista viivaa ei ilmesty tulosikkunaan 4 minuutin jälkeen. Toista testi uudella testillä!