


Koriongonadotropiini (hCG) on istukkakudoksen syntetisoima dimeerirakenteinen glykoproteiinihormoni. Hormonia erittyy trofoblasteista hedelmöityneen munasolun kiinnittymisestä lähtien. Se ylläpitää raskauden alussa keltarauhasen ja myöhemmin sikiön kivesten hormonieritystä.

Graviditetstestet reagerar på ett hormon som heter humant koriongonadotropin (hCG) som endast förekommer hos gravida kvinnor eftersom det utsöndras från moderkakan. Det här hormonet börjar produceras när det befruktade ägget bäddar in sig i livmoderslemhinnan

**hCG Raskaustesti** on  
kvalitatiivinen  
immunokromatografinen  
pikatesti hCG:n  
määrittämiseksi **virtsaasta tai seerumista** raskauden toteamiseksi.

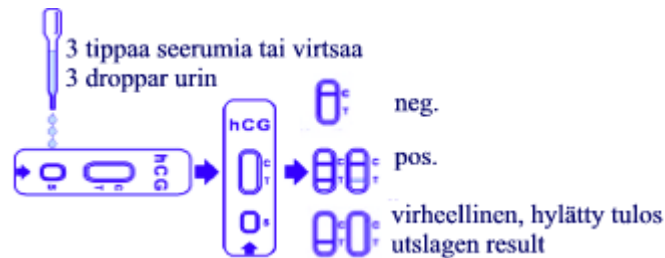

**hCG Graviditetstest** är kvaliatativ immunochromatographic snabbtest för att mäta hCG i **urin eller serum.**

**hCG Raskaustesti / hCG Graviditetstest:**

\* Luotettava CE certified (98/79/CE), ISO 9001 & ISO 13485 certified  
Pälitligt **WHO:n 3. standardi** (Third International Standard)

\* Spesifinen 100 %  
Specific

**hCG Referenssimenetelmä/ hCG Referensmetod**

Menetelmä Metod	Muu hCG Pikatesti Annan snabbtest		Kokonaistulokset/ Totalresultat	
	Tulokset/Resultat POS +	NEG -		
<b>hCG Raskaustesti/ Graviditetstest</b>	POS +	81	0	81
	NEG -	0	78	78
<b>Kokonaistulokset/Total Resultat</b>		81	78	159

\* Herkkä 100 % 10 mIU/ml \* (\*Doc Badonnell tutkimus-  
Sensitiv Regional maternity of Nancy-Sep 2000)

\* Käytännöllinen - säilyvyysaika valmistuksesta 20-24 kuukautta huoneenlämmössä/  
Praktiskt hållbartiden från tillverkning 20-24 månader i rumtemperatur  
- helppo yksivaiheinen suoritus/lätt 1-fas metod  
- nopea, tulos saadaan alle 3 minuutissa/snabbt, resultat under 3 minuter



Maahnatoija/Importör  
Ekoweb Oy  
Pharmacy  
Itäinen Pitkätatu 4 B  
20520 Turku

Tel. +358 50 3633969 VAT ID  
Fax +358 2 6518 2549 FI10309538  
info@ekoweb.fi  
www.ekoweb.fi

**hCG Raskaustesti ei ristireagoi** muiden hormonien (LH 300mIU/ml, FSH 1000 mIU/ml, TSH 1000 µIU/ml vs. negatiivinen 0 mIU/ml hCG ja positiivinen 25 mIU/ml hCG) kanssa. Myöskään mm. asetyylisalisyylihappo, askorbiinihappo, atropiini, asetaminofeni tai bilirubiini eivät häiritse. **hCG Graviditetstest krysreagerar inte** med andra hormoner (LH 300mIU/ml, FSH 1000 mIU/ml, TSH 1000 µIU/ml vs. negativ 0 mIU/ml hCG och positiv 25 mIU/ml hCG) eller med askorbinsyra, astylsalsylsyra, atropin, astaminofen, bilirubin.

- \* Tuotenumero: 5405 Raskaustesti (kasettitesti) virtsa ja seeruminäytteestä  
Produktnummer: 5405 hCG Graviditetstest (kasettformat) från urin- och serumprov (pakkaus sisältää 50 testiä, 50 kpl kertakäyttöpipettejä ja käyttöohjeen)  
(testförpackningen innehåller: 50 tester, 50 pipetter och bruksanvisning)

### Käyttöohje:

- \* hCG Raskaustesti voidaan säilyttää huoneenlämmössä. Ei saa jäätyä!
- \* Virtsanäytteet säilytetään 2-8 °C:ssa. Jos säilytys kestää yli 48 tuntia ennen testin suorittamista, näytteet suositellaan pakastettavan ja säilytettävän alle -20 °C:ssa.
- \* Jääkaapissa säilytetyt testipakkaukset, näytteet ja/tai kontrollit on oltava huoneenlämpöisiä (15–30°C) ennen käyttöä.

### Bruksanvisning

- \* hCG Graviditetstest kan förvara i rumtemperatur. Får inte frysas!
- \* Förvara urinprov i kylskåpet 2-8 °C. Om det ska ta över 48 timmar att utföra testen lämna provet i frysskåp (-20°C).
- \* Före utföra testen provet, tester och kontroll måste vara i rumtemperatur (15-30°C).

1. Aseta testi puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Pipetoi 3 kokonaista pisaraa (n.120 µl) virtsaa / seeruminäytettä testin näytekuppaan S (= sample).
3. Odota kunnes punainen viiva/punaiset viivat ilmestyvät kohtaan T (=testi) ja/tai kohtaan C (=kontrolli).
4. Lue tulos (virtsanäyte) 3 minuutin kuluessa ja (seeruminäyte) 5 minuutin kuluttua. Testiä ei saa tulkita 10 minuutin jälkeen.



Positiivinen tulos: Kaksi punaista viivaa T (testi) ja C (kontrolli).  
POSITIV result: Två röda liner C(kontroll) och T (test).



Negatiivinen tulos: Yksi punainen viiva C (kontrolli).  
NEGATIV result: En röd linje C (kontroll)



Hylätty tulos: Ei kontrolliviivaa C.  
UTSLAGEN result: inte C (kontroll) linjen.  
Utföra en ny test.

1. Börja med att noga läsa anvisningarna.
2. Lägg testen på plan och ren yta.
3. Ta urinprovet i en mugg och sedan droppar en 3 droppar (ungefär 120 µl) urin med hjälp av en pipett i en testbägare S (= provet)
4. Vänta tills röd/röda linje/linjer formar sig i testen.
5. Läs test resultat efter 3 minuter (urinprov) eller efter 5-10 minuter (serumprov). Testen får inte tolkas efter 10 minuter.

Valmistaja/Tillverkare: AllDiag, [www.alldiag.com](http://www.alldiag.com)



Maahnatuojä/Importör  
Ekoweb Oy  
Pharmacy  
Itäinen Pitkätatu 4 B  
20520 Turku

Tel. +358 50 3633969  
Fax +358 2 6518 2549  
info@ekoweb.fi  
www.ekoweb.fi  
VAT ID  
FI10309538