


Koriongonadotropiini (hCG) on istukkakudoksen syntetisoima dimeerirakenteinen glykoproteiinihormoni. Hormonia erittyy trofoblasteista hedelmöittyneen munasolun kiinnittymisestä lähtien. Se ylläpitää raskauden alussa keltarauhasen ja myöhemmin sikiön kivesten hormonieritystä.

hCG Raskaustesti on kvalitatiivinen immunokromatografinen pikatesti hCG:n määrittämiseksi virtsasta tai seerumista raskauden toteamiseksi.

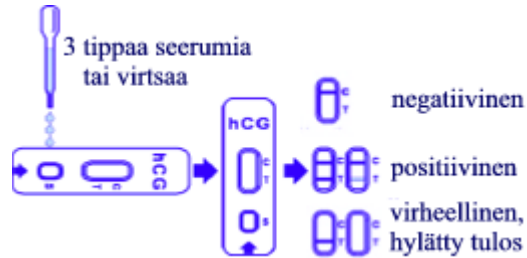

hCG Raskaustesti on

* **Luotettava**

CE sertifikaatti 98/79/CE
ISO 9001 ja ISO 13485 sertifikaatit
WHO: n 3. Standard (Third International Standard)

* **Spesifinen**

100 %

Menetelmä	hCG Referenssimenetelmä Muu hCG Pikatesti		Kokonaistulokset	
	Tulokset	Positiivinen		Negatiivinen
hCG Raskaustesti	Positiivinen	71	0	71
	Negatiivinen	0	88	88
Kokonaistulokset		71	88	159

* **Herkkä**

100 % 25 IU/ml

* **Tarkka**

100 %

* **Käytännöllinen**

- säilyvyysaika yli 20–24 kuukautta huoneenlämmössä
- helppo yksivaiheinen suoritus
- nopea, tulos saadaan alle 3 minuutissa



Ekoweb Ltd.

Kaarina
Finland

Tel. +358 50 3633969

Fax +358 22433786

info@ekoweb.fi

www.ekoweb.fi

VAT ID

FI10309538

hCG Raskaustesti ei ristireagoi muiden hormonien (LH 300mIU/ml, FSH 1000 mIU/ml, TSH 1000 μ IU/ml vs. negatiivinen 0 mIU/ml hCG ja positiivinen 25 mIU/ml hCG) kanssa. Myöskään mm. asetyylisalisyylihappo, askorbiinihappo, atropiini, asetaminofeni tai bilirubiini eivät häiritse.

* **Tuotenumero:** 8.04.01.0.0030 Raskaustesti (kasettitesti)
virtsa/seeruminäytteestä
(pakkaus sisältää 30 testiä, 30 kpl kertakäyttöpipettejä ja käyttöohjeen)

Käyttöohje:

- * **hCG Raskaustesti** voidaan säilyttää huoneenlämmössä tai jääkaapissa (2-30 °C). Ei saa jäätyä!
- * Virtsa-/seeruminäytteet säilytetään 2-8 °C:ssa. Jos säilytys kestää yli 48 tuntia ennen testin suorittamista, näytteet suositellaan pakastettavan ja säilytettävän alle -20 °C:ssa.
- * Jääkaapissa säilytetyt testipakkaukset, näytteet ja/tai kontrollit on oltava huoneenlämpöisiä (15–30°C) ennen käyttöä.

1. Aseta testi puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Pipetoi 3 kokonaista pisaraa (n.100 μ l) virtsaa / seeruminäytettä testin näytekuppaan S (= sample).
3. Odota kunnes punainen viiva/punaiset viivat ilmestyvät kohtaan T (=testi) ja/tai kohtaan C (=kontrolli).
4. Lue tulos (virtsanäyte) 3 minuutin kuluessa ja (seeruminäyte) 5 minuutin kuluttua. Testiä ei saa tulkita 10 minuutin jälkeen.



Positiivinen tulos: Kaksi punaista viivaa T (testi) ja C (kontrolli).



Negatiivinen tulos: Yksi punainen viiva C (kontrolli).



Hylätty tulos: Ei kontrolliviivaa C.